

Ablauf des SARS CoV 2 Schnelltests

1. Gebrauchsanleitung des Tests aufmerksam lesen
2. Alle notwendigen Materialien bereitstellen (s. Checklisten und Video)
3. Persönliche Schutzausrüstung anlegen
4. Testperson in den Testraum bitten und Daten aufnehmen
5. Testperson nach Blutverdünnung und frei durchatembaren Nasenloch befragen
6. Testperson auf Stuhl mit Lehne platzieren, Testperson nimmt den Mund-Nasen-Schutz ab
7. Testperson schnäuzen lassen
8. Teststäbchen, Testlösung und Test erst kurz vor der Testung öffnen
9. Abstrichentnahme im Nasenrachen
10. Testperson Tuch zum Schnäuzen anbieten
11. Weitere Verarbeitung des Tupfers nach Packungsbeilage
12. Nach dem Test: Testperson legt den Mund-Nasen-Schutz sofort wieder an
13. Tester wechselt die Handschuhe und führt eine Händedesinfektion durch, Kittel- und Maskenwechsel ist bei Durchfeuchtung erforderlich
14. Die vom Hersteller angegebene Ablesezeit von 30 min darf nicht überschritten werden, ansonsten wird der Test ungültig
15. Ablesen des Tests: die Kontrolllinie muss immer im Test sichtbar sein, ansonsten ist der Test ungültig
16. Auch eine nur blasse Linie in der Testlinie gilt als positiv

Quelle: MDK Nordrhein, verändert

Links und Unterlagen:



Oder: <https://www.willy-hellpach-schule.de/index.php/service/schulung-schnelltest>

Stand: 3.3.2021

Verhalten bei positivem Schnelltest-Ergebnis

Getestete/n aufklären und beruhigen! Weitere Schritte:

1. Die/der Getestete und alle Mitglieder des Haushaltes sind bis auf weiteres in Quarantäne.
2. Der durchgeführte Schnelltest muss mit einem PCR-Test überprüft werden
Anmeldung durch Getestete/n bei Testzentrum (Tel. 06221-522-1881),
Schwerpunktpraxis oder Hausarzt
3. Meldung durch Testenden an infektionsschutz@rhein-neckar-kreis.de
Oder per Fax an 06221-522-1899
mit entsprechendem Formular
4. Das Ermittlungsteam des Gesundheitsamtes meldet sich für die Nachverfolgung, daher Formular mit Telefonnummer und/oder Email-Adresse der/des Getesteten ergänzen.

Stand 27.02.2021

Gemäß Telefonat mit Gesundheitsamt HD/Corona Hotline; GG

Materialbeschaffung (nur für öffentliche Schulen)

Test-Kits und Material können über die Emailadresse
schulbeschaffungen@heidelberg.de
angefordert werden.